

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA WORKA CONFIDENCE BE go™

Worki Confidence BE go™ – dostępne w wersji zamkniętej lub odpuszczalnej – z płaską płytką lub płytką typu convex. Nakładki dostępne są w 6 różnych kolorach: czarnym, dżinsowym, granatowym, brązowym, beżowym i białym.



CONFIDENCE
BE go™

JAK UŻYWAĆ CONFIDENCE BE GO™

KROK 1:

Przyklej płytkę zdejmując wcześniej zabezpieczenie

(tylko dla worków odpuszczalnych: zwiń ujście worka całkowicie do góry i zabezpiecz niebieskim zapięciem)



KROK 2:

Wsuń niebieski języczek nakładki

w kieszonkę worka



KROK 3:

Przyciśnij delikatnie brzegi nakładki



Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć prosty film instruktażowy:



PRAKTYCZNE PORADY DOTYCZĄCE CONFIDENCE BE GO™

Masz ochotę zmienić kolor?: Chwyć za zakładkę u góry worka i pociągnij ją w dół, aż nakładka całkowicie się odczepi. Następnie wykonaj kroki 2 i 3, aby założyć inną nakładkę.

Sprawdzanie okienka podglądu: Chwyć za zakładkę u góry worka i delikatnie odczep nakładkę od góry do połowy, aby mieć widok na stomię. Następnie przywróć nakładkę do pierwotnej pozycji, dociskając ją delikatnie z powrotem do materiału z rzepem.

Czyszczenie i opróżnianie worka odpuszczalnego: Podnieś nakładkę, znajdź niebieskie zapięcie i pociągnij je do góry. Chwyć ujście po bokach i powoli rozwijaj w dół, aż całkowicie się otworzy. Opróżnij zawartość, a następnie oczyść wnętrze ujścia chusteczką. Zwiń ujście z powrotem do góry i zabezpiecz niebieskim zapięciem.



INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRANIA



Nakładki Confidence BE go™ można prać ręcznie lub w pralce. Aby wyprać je w pralce, wtóż nakładkę (jedną lub więcej) do dołączonej kosmetyczki do prania i ustaw temperaturę 30°C. Kosmetyczka mieści po dwie nakładki w każdej przegrodzie – maksymalnie cztery nakładki łącznie. Nakładki należy umieścić tyłami do siebie, tak aby niebieski języczek był skierowany na zewnątrz.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE FILTRA

Confidence BE go™ został zaprojektowany tak, aby spełniać wszystkie potrzeby osób z wytonioną stomią - nakładki nie wptywają na działanie filtra w żaden sposób.

Balonowanie Nadmuchiwanie worka (tzw. balonowanie), jeśli worek napętni się gazem i zacznie się „nadmuchiwać”, delikatnie dociśnij jego górną część, aby wypuścić powietrze. Nie ma potrzeby używania naklejek ochronnych – filtr jest w pełni zabezpieczony przed wilgocią!

Zaleganie treści jelitowej przy stomii zamiast jej swobodnego spływu do worka może być związane ze sklejeniem się ścianek worka. Aby temu zapobiec, przed założeniem możesz delikatnie wdmuchnąć do worka niewielką ilość powietrza przez otwór w przylepcu – pomoże to rozdzielić jego wewnętrzne warstwy.

CONFIDENCE BE go™

Dowiedz się więcej o Confidence BE go™
i sprawdź, jak z niego korzystać

www.salts.pl



Dystrybutor:
Med4me Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa
infolinia 800 120 130
info@med4me.pl

Producent:
SALTS Healthcare Ltd,
Richard Street, Aston,
Birmingham, B7 4AA,
Wielka Brytania

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją użycia.

® Zarejestrowane znaki towarowe spółki Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2024.

Produkty oraz znaki towarowe spółki Salts Healthcare Ltd. są chronione patentami brytyjskimi i zagranicznymi, zarejestrowanymi wzorami oraz znakami towarowymi.

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

 **salts**
HEALTHCARE



RM766401 02/26